

**Аптечка для оказания
первой помощи с применением медицинских изделий в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность**



Состав:

№	Наименование	Требуемое количество (не менее)
1	Медицинские изделия	
1.1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары
1.3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	2 шт.
1.4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.
1.5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 5 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 5 см	2 шт.
1.6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см	3 шт.
1.7	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см	3 шт.
1.8	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10	2 упак.
1.9	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	1 шт.
1.10	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см	20 шт.
1.11	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см	4 шт.
1.12	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см	1 шт.
1.13	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани	1 шт.
2	Прочие средства	
2.1	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	1 шт.
2.2	Блокнот формата не менее А7	1 шт.
2.3	Маркер черный (синий) или карандаш	1 шт.
2.4	Футляр или сумка	1 шт.

Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке, указанным в п.4 Требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность утв. Приказом Минздрава России от 24.05.2024 г. №261н.

Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность медицинских изделий по группе «Л» ГОСТ 15150. Утилизация и уничтожение использованных изделий осуществлять согласно требованиям СанПин 2.1.3684.

ТУ 21.20.24-026-26528997-2024

Производитель: ООО НПФ «МИРАЛ»

394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 34-33

Место производства: ООО НПФ «МИРАЛ»

394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1

Тел. (473) 2-211-212

Срок годности: 4 года

Дата изготовления:

Партия:

Штамп ОТК:

06 2025
062
11



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»МРОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.55579

Срок действия с 25.06.2024 по 24.06.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, интер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 110/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ТУ 21.20.24-026-26528997-2024 (см. приложение №1).
Серийный выпуск.

Код ОК
21.20.24.170Код ТН ВЭД
3006500090

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 50444-2020

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ИПФ «МИРАЛ», Адрес: Россия, 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, Центральный р-н, ул. Фридриха Энгельса, д. 34, кв. 33. Место производства: Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1, ИНН: 3666000915, ОГРН: 1023601580177, телефон: +7 (473) 221-12-12, электронная почта: info@ipfmiral.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью ИПФ «МИРАЛ», Адрес: Россия, 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, Центральный р-н, ул. Фридриха Энгельса, д. 34, кв. 33, ИНН: 3666000915, ОГРН: 1023601580177, телефон: +7 (473) 221-12-12, электронная почта: info@ipfmiral.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №50847-ПРГ/24 от 24.06.2024 Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.10/158 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа
по сертификации

В.В. Ерофеев

В.В. Ерофеев

Эксперт

В.В. Ерофеев

А.Р. Теплова

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Данный сертификат действителен только при условии соблюдения условий применения системы добровольной сертификации «Промтехстандарт», что будет обеспечено при условии соблюдения условий добровольной сертификации «Промтехстандарт» и подкрепления при необходимости в соответствии с условиями применения системы.

Инструкция по использованию аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Общая последовательность действий

№ п/п	Описание действий	Изображений действий
1.	Проведите оценку обстановки и обеспечьте безопасные условия для оказания первой помощи. При необходимости переместите пострадавшего в безопасное место. В случае невозможности обеспечения безопасных условий – вызовите соответствующие службы по телефону 112	
2.	Выполните обзорный осмотр пострадавших для выявления продолжающегося наружного кровотечения, при обнаружении кровотечения остановите его одним или несколькими способами	 
3.	Определите признаки жизни: - наличие сознания (при наличии сознания переходите к подробному осмотру - п. 5) - наличие дыхания	 
4.	4.1. При отсутствии сознания и дыхания – вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112 и начните сердечно-легочную реанимацию 4.2. При наличии или появлении у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания – придайте пострадавшему устойчивое боковое положение, вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112 (если вызов не был осуществлен ранее)	 
5.	Проведите подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений и прочих состояний, требующих оказания первой помощи	
6.	Выполните необходимые мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от имеющихся у него состояний: - окклюзионная (герметизирующая) повязка - промывание желудка при отравлениях - охлаждение при ожогах и перегреваниях - согревание и термозащита при переохлаждениях и отморожениях - повязки и обездвиживание при травмах - предотвращение травмирования и поддержание проходимости дыхательных путей при судорожном приступе	
7.	Окажите помощь пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом	
8.	Придайте пострадавшему оптимальное положение тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения степени его страданий)	
9.	Вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112 (если вызов не был осуществлен ранее), контролируйте состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение и отсутствие наружного кровотечения), оказывайте пострадавшему психологическую поддержку. При прибытии бригады скорой медицинской помощи – передайте ей пострадавшего	

Назначение компонентов аптечки

№ п/п	Наименование вложения	Использование
1.	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
2.	Перчатки медицинские нестерильные (резиновые, латексные, нитриловые, виниловые)	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
3.	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
4.	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	Накладывайте на конечности при интенсивном кровотечении выше раны на 5 см.
5.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 5 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 5 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
6.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см или фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см	
7.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м x 14 см или фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см	
8.	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
9.	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	Используйте для фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди
10.	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см	Закрывайте пластырем достаточного размера поверхностные мелкие раны, ссадины, потертости
11.	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см	
12.	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см	Используйте для укутывания пострадавшего при риске его переохлаждения (или при уже развившемся переохлаждении)
13.	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани	Применяйте для разрезания одежды для доступа к ранению, отрезания бинтов и лейкопластыря нужной длины, для вскрытия упаковок

После использования аптечки восполните ее израсходованные компоненты.
Телефоны экстренных служб: 112
